

Respirátor FFP2 NR

Počet ks. v jednom balení: 20

Třída ochrany: FFP2 NR

Složení: Částečně netkaná textilie (polypropylen), Fe drátek, gumička (elastan, polyamid)

Certifikace: CE, FDA, výrobek splňuje normu EN 149:2001 + A1:2009

Uživatel by měl provést test těsnění při každém použití masky podle následujících pokynů:



1. Zkontrolujte respirátor, zda nevykazuje praskliny neb poškození a pokud zjistíte jakékoliv nesrovnalosti, zlikvidujte jej.
2. Ujistěte se, že nástavec zakrývá můstek nosu, rozvírá se nad můstkem nosu a zakrývá bradu.
3. Umístěte smyčky kolem uší (styl ušní smyčky) nebo hlavy (styl hlavové smyčky).
4. Tvar nosní spony vytvarujte tak a by těsně přiléhal k můstku nosu.

Uživatelský manuál pro respirátor:

1. Nedodržení všech pokynů může vážně narušit účinnost tohoto respirátoru a vést k nemoci, zranění nebo smrti.
2. Správně zvolené vybavení pro ochranu dýchacích cest je nezbytné. Před použitím na pracovišti musí být zaměstnanec vyškolen zaměstnavatelem o správném používání v souladu s platnými bezpečnostními zdravotními normami.
3. Tento respirátor nedodává kyslík. Používejte v dostatečně větraných prostorech, které poskytují dostatečné množství kyslíku pro podporu života.
4. Zlikvidujte respirátor a vyměňte je za nový, pokud nadměrné ucpání respirátoru vede k dýchacím potížím, je-li respirátor poškozen nebo se objeví závratě, podráždění nebo jiné potíže. Opusťte kontaminovanou oblast a respirátor zlikvidujte.

Omezení použití:

1. Nepoužívejte respirátor ani nevstupujte do kontaminované oblasti nebo se v ní nezdržujte za následujících okolností
 - a: Vzduch obsahuje méně než 19,5 % kyslíku.
 - b: Když cítíte znečišťující látky.
 - c: Pro ochranu před plyny nebo parami.
 - d: Nečistoty nebo jejich koncentrace nejsou známy nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro život a zdraví.
 - e: Pro pískování, stříkání a azbest.
 - f: V oblastech se nebezpečím výbuchu.
2. Neupravujte respirátor.
3. Nepoužívejte respirátor s vousy na tváři nebo za jiných podmínek, které mohou zabránit dokonalé těsnosti respirátoru.
4. Respirátor musí být před každým použitím zkontrolován, aby bylo zajištěno, že v dýchací zóně nejsou žádné jiné otvory než propíchnutí a svorky a že nedošlo k poškození.
5. Tento respirátor chrání před určitými znečišťujícími částicemi, ale nezabrání riziku nemoci nebo infekce.
6. Tento respirátor označený "NR" nesmí být používán déle než jednu směnu.

Dovozce

Wenzhou Jinyi Medical Equipment Co., LTD.

No. 518-536, Zhengsong Avenue, Wanguan Town, Pingyang County, 325 409 China

Prodejce

Společnost Podanky, s.r.o.

IČ: 292 78 660, sídlo: Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

e-mail: info@rouskydoslužeb.cz

www.rouskydoslužeb.cz

